

**MEDISANA THERMOMETER FTF
MET FLEXIBELE SENSORTIP**

NL

Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik zorgvuldig doorlezen!

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en hartelijk gefeliciteerd!

Voor een succesvol gebruik en een lange gebruiksduur van uw MEDISANA Thermometer FTF bevelen wij aan de hieronder beschreven aanwijzingen voor het gebruik en voor het onderhoud zorgvuldig door te lezen.

Uw MEDISANA AG



- 1 Sensor tip voor de temperatuurmeting
- 2 LCD-display voor de weergave van de temperatuur en van de functies
- 3 Starttoets (IN - UIT - Memory)
- 4 Kap van de batterijhouder

VERPAKKINGSINHOUD

Vergelijk de verpakking inhoud met de hieronder beschreven onderdelen.

- De MEDISANA Thermometer FTF
- Batterij type GP-192 of LR41 (reeds geïnstalleerd)
- Bewaar-etui
- 3 stuks thermometer-omhulsels
- Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden opgeslokt. Laat daarom de thermometer nooit zonder toezicht in kinderhanden.
2. Gebruik de thermometer uitsluitend voor de lichaamstemperatuur-meting.
3. Het instrument is niet voor commercieel gebruik bestemd.
4. Repareer het instrument in het geval van storingen niet zelf. Breek het gebruik af. Vraag uw vakhandelaar en laat het instrument alleen door de MEDISANA - servicedienst repareren.
5. Neem de beschreven gebruiks- en opbergvoorwaarden in acht, zodat de MEDISANA Thermometer FTF over een lange tijdruimte soepel en correct functioneert.

**NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE TEMPERAATUURMETING
MET DE MEDISANA THERMOMETER FTF**

Wat is koorts?

Onze gewone lichaamstemperatuur loopt van 36°C tot 37,5°C. Afhankelijk van de tijdstip van de dag en van de lichamelijke gesteldheid, bijv. gedurende de menstruatie van de vrouw, zijn afwijkingen normaal. Wanneer de lichaamstemperatuur echter 38°C of hoger is, is er sprake van koorts. Neem, in het geval dat de koorts boven 39° C stijgt en zelfs na 1 tot 2 dagen niet daalt, contact op met uw arts.

Koorts meten - snel en correct!

Een koortsachtige ziekte gaat dikwijls gepaard met vermoeidheid, pijn van de botten en koude rillingen rillen. Het verloop van de ziekte kan optimaal worden gecontroleerd door 2 tot 3 keer per dag met tussenpozen van 4 tot 6 uur koorts te meten. De meting moet altijd op dezelfde plek van het lichaam en ongeveer op dezelfde tijdstip worden verricht, zodat de resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken.

Mit behulp van de MEDISANA Thermometer FTF kunt u bijzonder eenvoudig en snel de actuele lichaamstemperatuur meten. Vaak voorkomende fouten, zoals te korte meetperiodes zijn nauwelijks mogelijk. Na 10 - 20 seconden geeft het instrument al een exact resultaat aan dat tot de volgende meting automatisch opgeslagen wordt.

Een temperatuurmeting kan op de volgende plekken worden verricht:

- a) onder de tong (oraal),
- b) onder de oksels (axillair),
- c) in de anus (rectaal)

VOOR HET GEBRUIK

Batterij plaatsen/verwijderen:

De MEDISANA Thermometer FTF is klaar voor gebruik, omdat er reeds een batterij geïnstalleerd is. Indien na een zekere gebruiksduur rechts in het display het „▼“-symbool verschijnt, moet de batterij worden vervangen. Verwijder hiervoor de kap 4 van de batterijhouder en schuif deze ca. 0,5 cm uit de thermometer naar voren. Verwijder voorzichtig met behulp van een geschikt voorwerp, bijv. een kogelpent, van onderaan de knoopbatterij. Plaats de nieuwe knoopbatterij en let op dat het „+“-symbool naar boven wijst. Schuif de batterijhouder terug in de thermometer en bevestig hierop de kap.

HET GEBRUIK

Meting

Druk op de start-knop 3 om het instrument in te schakelen. Alle symbolen verschijnen ca. twee t/m drie seconden lang in het display en er klinkt kortstondig een geluidsignaal. Indien de temperatuur minder dan 32°C bedraagt, verschijnt in het LCD-display 2 een „L“ en het symbool „°C“ gaat fllikkeren. Nu is de MEDISANA Thermometer FTF gereed voor de meting. Plaats de sensortip 1 oraal, axillair of rectaal. De meting van de thermometer wordt automatisch gestart. Gedurende de meting wordt de actuele temperatuur voortdurend aangegeven. Zodra de temperatuurschommeling minder dan 0,1 °C in 8 seconden bedraagt, klinkt er een geluidsignaal en de gemeten temperatuur wordt in het display 2 weer-gegeven. De thermometer wordt tien minuten na de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een langere gebruiksduur van de batterij kan het beste direct na het aflezen van de temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd. Druk hiervoor op de start-toets 3.

Metingen op verschillende plekken van het lichaam

De MEDISANA thermometer FTF is geschikt voor orale (in de mond), axillaire (onder de oksels) of rectale (in de anus) temperatuurmetingen. De meting duurt ca. 60 seconden. Neem voor een veilige en exacte meting de hieronder beschreven aanwijzingen voor het plaatsen in acht.

ORALE METING:

Plaats de sensortip 1 van de thermometer onder de tong en sluit de mond. Haal gedurende de meting door de neus adem om verkeerde waarden te voorkomen.



Meetduur 60 seconden

RECTALE METING:

De rectale meting wordt door vele patiënten als onangenaam ondervonden, maar deze levert wel exacte resultaten op. De MEDISANA thermometer FTF versoepelt met zijn sensortip en met de flexibele schacht de meting op dit lichaamsplek. Voer de sensortip 1 voorzichtig ca. 3,5 cm diep in het rectum in, om de lichaamstemperatuur snel en betrouwbaar vast te stellen. Na ca. 60 seconden kunt het resultaat in het display aflezen.



Meetduur 60 seconden

METING ONDER DE OKSELS:

Reinig voor de meting de oksel. Plaats de meetgedeelte 1 van de thermometer onder de oksel. Beweeg de arm naar beneden houd deze gedurende de meting zacht tegen het lichaam gedrukt.



Meetduur 60 seconden

HET GEBRUIK VAN DE THERMOMETER-OMHULSELS

Bij de MEDISANA Thermometer FTF zijn er 3 stuks omhulsels meegeleverd. Deze zijn voor eenmalig gebruik (bijv. voor de rectale meting) bestemd. Voor het gebruik van deze omhulsels trek deze van bovenaf uit elkaar, d.w.z. aan de met gekenmerkte zijde, en steek dan de tip van de thermometer in de opening. Houd nu het bovenste uiteinde van het beschermende omhulsel aan de thermometer vast en rol langzaam de papierstrook er af samen met het zijwaarts uitstekende kunststofmateriaal. Nu is de thermometer binnen het omhulsel gereed voor gebruik. Na de meting kunt u het omhulsel van de thermometer verwijderen en wegwerpen.

GEHEUGEN - FUNCTIE

De MEDISANA Thermometer FTF beschikt over een geheugen - functie die het mogelijk maakt de laatste opgeslagen waarde op te roepen. Schakel de thermometer uit en druk voor de weergave van de laatste gemeten waarde ca. drie seconden lang op de starttoets 3. Naast de aangegeven waarde een „M“ voor „Memory“. Na ca. 5 seconden wordt het display automatisch uitgeschakeld.

REINIGING EN DESINFECTIE

De MEDISANA Thermometer FTF is waterdicht en kan daarom eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Reinig de thermometer voor en na iedere meting met een in een zachte oplossing op basis van alcohol gedrenkte doek. Er bestaat bovendien de mogelijkheid de thermometer in een geschikte desinfectiemiddel onder te dompelen. Uw vakhandelaar zal uw graag de geschikte reinigingsproducten aanbevelen en toelichtingen over het gebruik geven.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Meetbereik:32,0°C - 42,9°C
- Graadverdeling:0,1°C
- Meetnauwkeurigheid:± 0,1°C (Afwijkingen van de feitelijke lichaamstemperatuur Binnen en meetbereik van 34°C - 42°C bij een omgevingstemperatuur van 18°C t/m 28°C)
- Automatische controle:Autom. interne controle op proefwaarde 37°C, bij afwijking >0,1 verschijnt „ERR“.
- Gebruiksduur:ca. 3000 metingen
- Naam en model:Thermometer FTF
- Bedrijfstemperatuur:10 °C t/m 40 °C
- Opbergtemperatuur:-10°C t/m + 60°C
- Afmetingen:10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm(B)
- Gewicht:10 g
- Batterijen:1 Micro-batterij (type GP-192 of LR 41)
- Artikel-nr.:77022
- EAN Code:40 15588 77022 7
- Reserveomhulsels:Art.-nr.: 76111

CE 0297



Het instrument voldoet aan de B-veiligheidsklasse
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

CE - keurmerk volgens EU - richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en vervaardiging onder inachtneming van volgende Europese normen: EN 12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 en 2.

Technische wijzigingen ter verbetering en verdere ontwikkeling van het product voorbehouden.

AFVALBEHEER

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijderd. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Garantie en reparatievoorwaarden

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
 - a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
 - b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
 - c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
 - d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage
5. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

MEDISANA BENELUX NV

Euregiopark 18
NL-6467 JE Kerkade
Fon: + 31 / 45 - 5 28 03 89
Fax: + 31 / 45 - 5 23 35 18
eMail: info@medisana.nl